

# ALBAcheck® - BGS Reagente di controllo per anti-D

**REF** Z271

Nocivo



Produttore



Codice prodotto

## UTILIZZAZIONE PREVISTA

ALBAcheck®-BGS reagente di controllo per anti-D è inteso come controllo negativo delle prove effettuate con i reagenti monoclonali Alba Bioscience anti-D.

## DESCRIZIONE DEL REAGENTE

Il reagente è formulato similmente ai reagenti monoclonali anti-D Alba Bioscience Z031, Z036, Z039, Z041. Il reagente contiene anche EDTA e 1 g/l di azoturo di sodio.

Il volume del liquido erogato dal contagocce è di circa 40 µl. Il giusto rapporto tra eritrociti e siero deve sempre essere mantenuto nelle prove.

Il reagente è conforme alle prescrizioni della direttiva 98/79/CE per i dispositivi medici diagnostici *in vitro* e alle raccomandazioni del Servizio trasfusionale del Regno Unito.

## MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Il reagente deve essere conservato tra 2°C e 8°C. Non usare se torbido. Non diluire. Il reagente è stabile fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

## PRECAUZIONI D'UTILIZZO

Il reagente contiene lo 0,1% di azoturo di sodio (n. CE 247-852-1) ed è classificato come nocivo. R22 Nocivo per ingestione. Può reagire con il piombo o il rame delle tubazioni formando sali esplosivi; smaltire con acqua in eccesso.

Il prodotto è per uso professionale esclusivo *in vitro*.

## PROCEDURE DI PROVA

### Informazioni generali

ALBAcheck®-BGS reagente di controllo per anti-D è inteso come sostituto dei reagenti monoclonali anti-D da controllare e deve essere usato con le stesse modalità di prova degli stessi.

### CONTROLLO QUALITÀ

Questo è un reagente di controllo e le sue caratteristiche soddisfacenti quando usato con le tecniche raccomandate rappresentano un adeguato livello di controllo.

### LIMITAZIONI

Risultati falsi positivi o falsi negativi possono verificarsi a causa di contaminazione dei materiali di prova, temperatura

di reazione impropria, stoccaggio improprio di materiali e omissione di reagenti.

## DATA DI PUBBLICAZIONE

2016-06-13




Alba Bioscience  
Ellen's Glen Road  
Edinburgh  
Scotland, Regno Unito  
EH17 7QT

Tel: +44 (0) 131 658 5700

Fax: +44 (0) 131 672 3026

E-mail: [customer.serviceEU@quotientbd.com](mailto:customer.serviceEU@quotientbd.com)

Per ulteriori informazioni o consigli si prega di contattare il distributore locale.

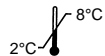

## INTRODUZIONE

ALBAcheck® BGS è un marchio registrato di un gruppo di prodotti fabbricati da Alba Bioscience per il controllo delle prove sierologiche di tipizzazione.

Dato che alcuni reagenti monoclonali anti-D prodotti da Alba Bioscience sono formulati anche per l'uso con tecnica su vetrino, è essenziale prevedere l'uso di un reagente di controllo.

Il reagente è progettato per l'uso come controllo negativo nelle prove con i reagenti anti-D: Z031; Z036, Z039, Z041.

## INTERPRETAZIONE DEI SIMBOLI



Numero del lotto



Scadenza (aaaa-mm-gg)



Temperatura di conservazione (2°C–8°C)

Dispositivo medico diagnostico *in vitro*

Leggere le istruzioni per l'uso